

Absolute 深部注入カテーテル

AMGカテーテル

2011.4

■経産豚用



■未経産豚用



☆アダプター付きで個別包装 2010. 10月～密着性のよい従来のアダプターに統一いたしました☆



□全農畜産サービスの精液チューブに装着



□普通の（従来の）精液ボトルに装着



■AMG カテーテル専用ボトルもあります。

上の小さいキャップをねじ切り、カテーテルのアダプターを取って直接カテーテルに装着してください。



《販売元》全農畜産サービス株式会社

〒135-0034 東京都江東区冬木 11-17

- 施設・資材事業部 TEL:03-5245-2424
- 種豚事業部 TEL:03-5245-4886
- 東日本原種豚場 AIセンター : TEL:019-692-4801
- 西日本原種豚場 AIセンター : TEL:0968-37-2111
- 宮崎駐在（永富） : 080-1086-8645

深部注入 AI & カテーテル



当社では直営農場において、2005年より深部注入AIの実践と研究を行っております。あなたも深部注入AIを始めませんか!

Abカテーテル(Absolute Catheter)は精液注入時の加圧により、カテーテル先端部からメンブラン(ゴム)が伸び子宮頸管を超えて深部での精液注入ができる、簡単で安全な深部注入用カテーテルです。

● 特徴と経済的効果

スポンジ部分は従来どおりです。



先端部分の素材は手術用ゴムなので子宮頸管を傷つけません。



スポンジから先の部分が子宮頸管をかよって行きます。



精子が直接、子宮体まで流れていきます。



● 子宮内部

深部挿入カテーテルの精液が最初に出る場所

子宮頸管は外部から進入してきた「異物」を攻撃する作用が強い→精子もその対象となる

子宮頸管を越えた深部では「異物」攻撃の作用が少ない→精子も安全

● 特長と経済効果

- ① 高配時間の短縮…労働力の削減
- ② 受胎率・産子数の増加…約1頭/母豚 増加(平均)
- ③ 再発の減少

生産性向上

● 交配方法

深部AIにあたり従来の交配方法を変える必要はありません。2回種付け(NS+AI)や3回種付け(NS+AI+AI)の通常AIを深部注入AIへ置き換えるだけです。

注入にはちょっとしたコツと注意点がありますが、どなたにでもすぐできる簡単な方法です。

交配方法についてはご相談ください。